

Dobre praktyki pracy z alginatem

Przygotowania



Otwórz opakowanie



Przesyp zawartość do hermetycznie zamykanego pudełka.



Przed użyciem wstrząśnij pojemnikiem 2 lub 3 razy, aby ułatwić rozproszenie proszku



Wybierz odpowiedni zestaw miarek do rodzaju używanego alginatu

Odmierzanie i mieszanie ręczne



Odmierz proszek.



Odmierz wodę!
23°C-73°F



Wlej wodę do odmierzonego proszku



Mieszaj energicznie

Odmierzanie i mieszanie mechaniczne



Odmierz proszek.



Dodaj wodę do pojemnika*



Zamknij pojemnik i lekko zamieszaj, aby woda zwilżyła proszek




Umieść pojemnik w urządzeniu i zamknij pokrywę.

Pobieranie wycisku, dezynfekcja i transport



Umieść alginat na łyżce wyciskowej.

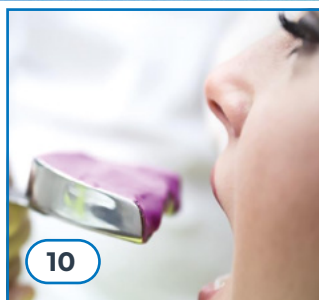

Pobierz wycisk



Opłucz i zdezynfekuj wycisk, a następnie ponownie wypłucz.



Schowaj wycisk do worka strunowego i przekaz technikowi. Zwilżony papier umieść pod łyżką wyciskową. Nie owijaj wycisku.

Pakiety promocyjne

MARZEC-KWIECIEŃ 2026

Zhermack
Dental

ZHERMACK

729 PLN

Elite HD+

Kup Elite HD+ 2x (450+450 ml)
**ODBIERZ II warstwę Elite HD+
Light/Regular normal
(2x 50ml)**



ELITE HD+



625 PLN

Hydrorise Putty

Kup 2x Hydrorise Putty (2x 300 ml)
**ODBIERZ III warstwę Hydrorise Light/Regular
(2x 50 ml) Putty Cut cutter for silicone**

2x



495 PLN

3x Occlufast Rock

Silikon Addycyjny do rejestracji zgryzu

Kup 3 opakowania
Occlufast Rock (2x 50 ml)
+ 12 mixing tips medium/green
**ODBIERZ Occlufast Rock (2x 50 ml)
+ 12 mixing tips medium/green**



OCCLUFAST



499 PLN

Hydrorise Maxi Putty/Heavy Body

Kup Hydrorise Maxi Putty Normal Set
(2x 380 ml cartridges)
+ 15 Dynamic Static tips
+ 2 mixing tips lockers
**ODBIERZ II warstwę
Hydrorise Light/Regular (2x 50ml)**



HYDRORISE



Czy znasz wszystkie masy alginatowe marki Zhermack?

Alginate firmy Zhermack spełniają najsurowsze normy jakościowe zarówno pod względem użytych materiałów, jak i proponowanych rozwiązań.

Są one dostępne w szerokiej gamie o charakterystycznych właściwościach, aby zaspokoić różnorodne wymagania codziennej praktyki klinicznej: od różnych czasów pracy i wiązania (normalny, szybki i bardzo szybki) po różnorodność kolorów i właściwości chromatycznych. Reprodukcji detali od 5 mikronów oraz stabilności wymiarowej od 48 do 120* godzin.



Zeskanuj kod QR
i dowiedz się więcej

MX-300

Automatyczny mieszalnik do mas alginatowych poprawiający jakość i powtarzalność gotowej masy, w porównaniu do mieszania ręcznego.

- Automatyczne mieszanie minimalizuje liczbę pęcherzyków i pozwala uzyskać jednolitą konsystencję
- Powtarzalne rezultaty niezależnie od operatora i jego doświadczenia
- Nowoczesna, kompaktowa konstrukcja zajmująca mało miejsca
- Specjalnie zaprojektowany wyświetlacz oraz przyciski umożliwiające zachowanie prawidłowej higieny i czystości urządzenia

MX-300*

Kup mieszalnik do alginatów MX-300
ODBIERZ 12x Hydrogum 5 – 453 g



Mieszalnik
MX-300

